



JATO

O Poder do

PLASMA

*Tudo que você precisa saber antes de
oferecer esse tratamento para as suas clientes*

A TECNOLOGIA *que revolucionou os* PROTOCOLOS *na estética* *corporal, facial, íntima e capilar!*

O Jato de Plasma é uma tecnologia que está em alta e é extremamente versátil, te permitindo realizar protocolos faciais, corporais e até mesmo íntimo e capilar, como: aumento da microcirculação, rejuvenescimento facial, flacidez de pele, tratamento para estrias, hiperpigmentação da pele, tratamento para estrias, flacidez palpebral e remoção de pequenas verrugas.

Mas você sabe o que é o plasma?

O plasma é o quarto estado da matéria, que se forma quando uma corrente elétrica de alta tensão tem contato com o ar atmosférico. Em termos técnicos, é um gás ionizado (oxigênio e hidrogênio), no qual tem separação dos elétrons dos átomos, apresentando comportamento coletivo, que acumula carga sobre um ponto fazendo força sobre o material.

No nosso dia a dia ele está presente no fogo, lâmpadas fluorescentes, televisão com tela de plasma, auroras polares, e até mesmo nos raios. O plasma é um bom condutor de eletricidade devido à abundância de elétrons livres e íons, que ao passar pelo tecido libera substratos auxiliando no controle do processo inflamatório, ou seja todo procedimento gera menos edema, eritema e etc.




JATO DE PLASMA

na estética

Cada vez mais o jato de plasma vem ganhando espaço no mercado, devido a sua versatilidade e resultados expressivos. Ele permite tratar áreas faciais, corporais e até mesmo íntimas. Além disso, ele possui um menor processo inflamatório e risco de hiperpigmentações.

Mas como ele funciona? Essa tecnologia trabalha epiderme e derme, ou seja, na pele, depositando uma descarga de plasma (que gera calor), causa uma lesão térmica na camada mais superficial da pele, resultando na produção de colágeno, modificação de fibras elásticas e reestruturação da derme.

Os protocolos mais comuns indicados são para poros dilatados, rugas, melasma, flacidez de pele, revitalização labial, contorno facial, sulcos, flacidez palpebral e na orelha, despigmentação, estrias, mas o que poucos sabem é que o jato de plasma também é indicado para estética íntima e tratamento capilar.

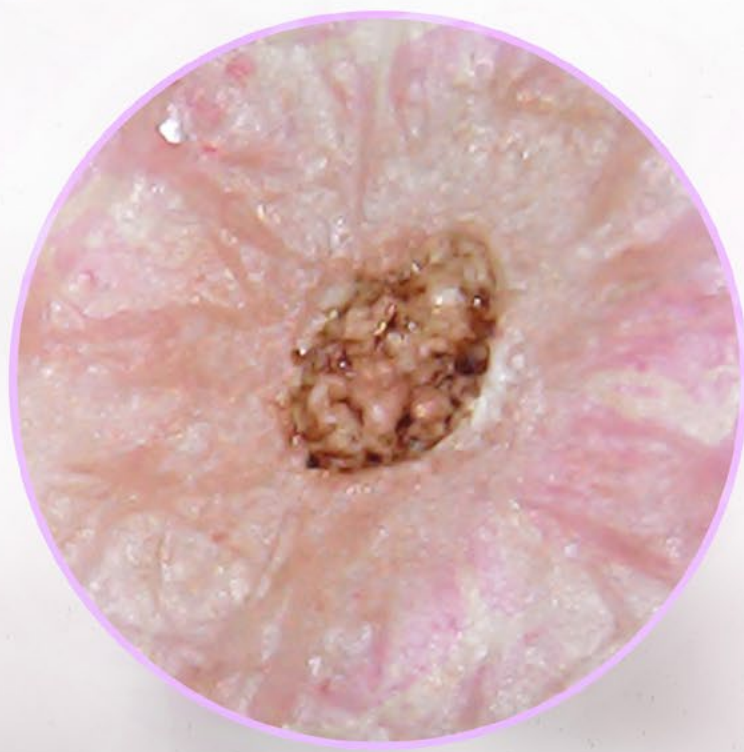

Lesão térmica com a termocontração ao redor

Verdade ou mito?

Saiba tudo sobre a tecnologia

A todo momento somos bombardeados de informação, mas nem tudo que vemos na internet podemos levar como verdade, por isso vamos esclarecer 6 afirmativas frequentes que escutamos sobre o jato de plasma. Será que todas são verdadeiras?

1 - O jato de plasma é indicado para remoção de tatuagem.

Mito, esse tipo de equipamento não é indicado realizar procedimentos de remoção de tatuagem.

2 - Com o jato de plasma consigo realizar blefaroplastia sem cortes.

Verdade, a tecnologia traz resultados incríveis para esse procedimento

3 - Jato de plasma e eletrocautério são a mesma coisa.

Mito, o jato de plasma e o eletrocautério são tecnologias distintas.

4- O jato de plasma pode ser associado com outros equipamentos.

Verdade, deverá apenas ser respeitado o intervalo de cada tratamento.

5- Essa tecnologia permite tratar manchas e obter ótimos resultados.

Verdade, há protocolos específicos para o tratamento.

6- O jato de plasma é indicado para terapia capilar

Verdade, através da técnica de contato é possível aumentar a circulação sanguínea local e estimular o crescimento de novos fios.

7 - Lesão rápida é sinônimo de eficiência.

Mito, quando fazemos uma lesão rápida o tecido não consegue fazer uma termocontração ao redor de cada um dos pontinhos, então o resultado e os benefícios só aparecerão depois de todo o processo de regeneração. Além disso, não gera nenhum benefício através dos substratos químicos.

JATO DE PLASMA ou Eletrocautério?

Dúvida comum entre todas as profissionais que começam a se interessar por essas tecnologias. Muitos acreditam que o eletrocautério é igual ao jato de plasma, mas não é. As técnicas podem até ser semelhantes e utilizadas para tratar os mesmos problemas, mas a grande diferença é a corrente promovida e o modo em que opera. O Jato de plasma utiliza corrente contínua ou pulsada de alta intensidade, já o eletrocautério utiliza a tecnologia de corrente alternada de baixa intensidade.

Jato de Plasma

- ✓ Corrente contínua
- ✓ **Descarga de plasma de 2 a 3 mm**
- ✓ Luminescência azul, violeta
- ✓ **Lesão menor e mais lenta**
- ✓ Sublimação e carbonização
- ✓ **Fulguração pontal**
- ✓ Fulguração varredura
- ✓ **Técnica de contato**
- ✓ Permeação de ativos
- ✓ **Lesões mais graduais**



Eletrocautério

- ✓ **Corrente alternada**
- ✓ Arco elétrico 0,5 mm
- ✓ **Luminescência na cor laranja**
- ✓ Lesão maior e mais rápida
- ✓ **Carbonização**
- ✓ Fulguração pontual e técnica de peeling elétrico
- ✓ **Lesões mais rápidas**

Em relação ao preço os aparelhos de eletrocautério variam de R\$ 4.000 a R\$ 7.500, já as canetas de jato de plasma ficam em torno de R\$ 3.400, segundo pesquisas realizadas no mês de fevereiro de 2023.

Plasmed

O único de descarga de **plasma** por corrente contínua **fabricado no Brasil!**

É o Jato de Plasma da Ibramed, que veio para revolucionar o mercado brasileiro com a praticidade e tecnologia de ponta. É um equipamento portátil e o único de descarga de plasma por corrente contínua fabricado no Brasil. Além disso, possui outros diferenciais como:

- ❖ **Menor processo inflamatório;**
- ❖ Menor risco de hiperchromias;
- ❖ **Menor incômodo no procedimento;**
- ❖ Menor edema no pós-procedimento;
- ❖ **Possibilidade de lesões superficiais e profundas;**
- ❖ Descarga de plasma mais estável e faz lesões de menor diâmetro;
- ❖ **Possui uma bateria interna, ou seja, não precisa necessariamente estar ligado a tomada;**
- ❖ Contém distanciadores exclusivos de aplicação para trazer maior segurança na aplicação, maior precisão no tratamento e controle dos tremores naturais das mãos.
- ❖ **Possui 1,2 watts de potência máxima permitida por segurança realizado em testes.**



TÉCNICA DE *Fulguração*

O Plasmed possui ponteiros exclusivos para aplicação da técnica de fulguração, podendo ser no modo pontual e varredura.

Ponteiras



**Ponteira
Curva**

Desenvolvida para que o usuário tenha melhor visibilidade no momento da aplicação.



**Ponteira
Reta**



**Ponteira
Agulha**




**Ponteira
Cone**



Pontual

Pontual é utilizada para promover uma lesão pontual por sublimação e cauterização no tecido até alcançar uma lesão mais superficial (esbranquiçada) ou profunda (escurecida).

Indicado para: rejuvenescimento, flacidez de pele, flacidez de pele palpebral, blefaro sem cortes, remoção de acrocórdons (verrugas), hiperpigmentação de pele.

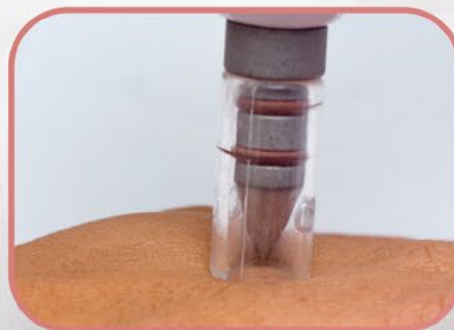

Varredura

Varredura: neste modo a aplicação é feita em ziguezague ou de forma circular, até alcançar uma lesão mais superficial ou profunda.

Indicado para: tratamentos de rejuvenescimento, flacidez de pele, flacidez de pele palpebral, hiperpigmentação da pele.

TÉCNICA DE *Contato*

Para a realização da aplicação dinâmica por contato ou peeling de plasma, o jato de plasma da Ibramed conta com 5 ponteiros, a P, M, G, Disco menor e maior, que deverão ser escolhidas de acordo com o tamanho da área de aplicação, quanto maior a área da ponteira maior é a intensidade que deverá ser escolhida.

Ponteiras



Ponteira **P**



Ponteira **M**




Ponteira **G**



Disco **Maior**




Disco **Menor**

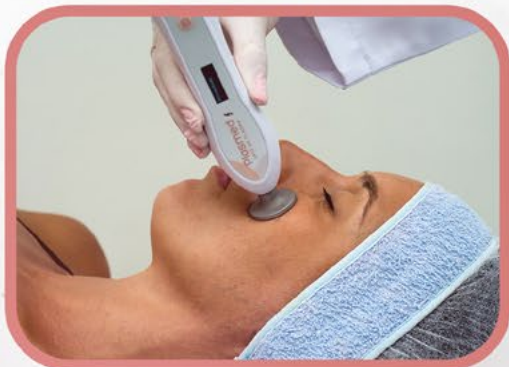

Peeling de Plasma

Peeling de Plasma: essa técnica utiliza as ponteiros de contato direto com a pele no sentido lifting ou em ziguezague, resultando no aumento da microcirculação e melhora da elasticidade da membrana.


Indicado para: aumento da microcirculação, rejuvenescimento facial, flacidez de pele, flacidez de pele palpebral, tratamento de estrias, tratamento de cicatrizes atróficas, olheiras e hiperpigmentação.

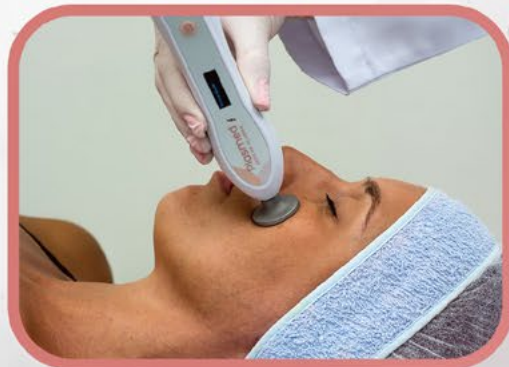

Permeação de ativos

Permeação de ativos: possui dois modos de aplicação, a utilização dependerá se o ativo desejado tiver polaridade negativa ou não, caso tenha a utilização deverá acontecer de maneira conjunta com a aplicação do Plasmed. Caso não tenha polaridade ou polaridade positiva, pode ser realizado o peeling primeiro seguido com o ativo. As ponteiros utilizadas são as de disco com contato direto com a pele de maneira dinâmica. É importante que o produto cosmético não possua componente alcoólico em sua composição, mas que tenha água, por ser corrente elétrica.

Indicado para: Permeação de ativos.

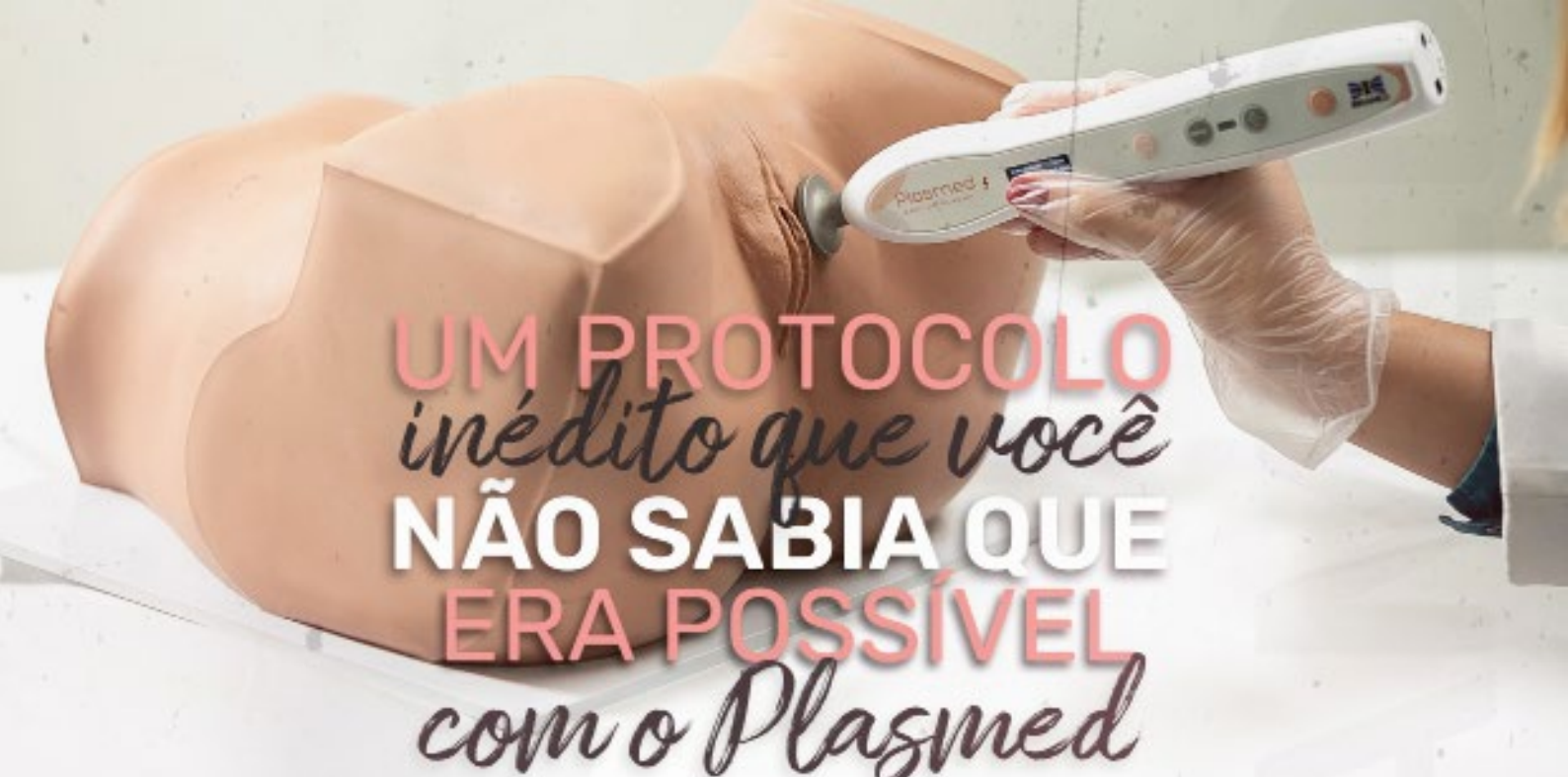

UM PROTOCOLO *inédito que você* NÃO SABIA QUE ERA POSSÍVEL *com o Plasmed*

A estética íntima com procedimentos não invasivos têm cada vez mais procura, segundo dados publicados da Folha de São Paulo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, 20 mil pessoas passaram por procedimentos estéticos íntimos em 2020 no Brasil. O jato de plasma pode ser realizado para esse fim, com tratamento de flacidez de pele íntima e da área das mamas e rejuvenescimento íntimo, mas com o diferencial de ser um tratamento não invasivo. Para te auxiliar a iniciar, vamos te passar um protocolo completo utilizando a técnica de peeling de plasma que tem como objetivo melhorar a coloração do tecido e a flacidez da pele. A técnica consiste na utilização das ponteiros disco em contato direto com a pele de maneira dinâmica (no sentido lifting ou em ziguezague), ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática gerando efeitos fisiológicos como o aumento da microcirculação e melhora da bioeletricidade da membrana.

Parâmetros:

Intensidades: 1 a 4 de acordo com a sensibilidade do paciente. Pode ser realizado com ou sem gel (caso seja realizado a seco, será necessária uma intensidade menor).

Modo de aplicação: realize movimento em ziguezague ou em círculos por quadrantes até que a área fique hiperêmica.

Ponteiras: P, M e G e discos (menor e maior), podem ser utilizadas todas as ponteiros de contato, a escolha será de acordo com o tamanho da região de tratamento.

Cosméticos: é possível utilizar cosméticos específicos para a área íntima depois do peeling de plasma, os cosméticos podem ser para clareamento ou para rejuvenescimento íntimo.

Intervalo entre as sessões: 7 dias

CONFIRA **3** PROTOCOLOS *completos que vão* **TE TRAZER** *resultados incríveis*

para **turbinar** ainda mais os **seus atendimentos**.

1- Blefaroplastia sem cortes

A técnica de aplicação pontual pode ser realizada com a técnica de 5 pontos como um dado. As fileiras rosas são fileiras de ancoragem para as fileiras salmão.




A técnica da blefaroplastia sem cortes, não deve ser realizada a aplicação na região da pálpebra móvel (círculo vermelho da foto abaixo).




- 1) Realizar a salmão de baixo para cima
- 2) Realizar duas fileiras salmão
- 3) Entre as fileiras salmão, realizar uma fileira rosa com metade do número de pontos da fileira salmão (para formar 5 pontos como um dado). Para ter bons resultados o pós deverá ter atenção e cuidado!!

Sempre realize um pré teste para identificar a melhor intensidade para atingir o nível de lesão desejado.

2-Tratamento de Rugas E LINHA DE EXPRESSÃO

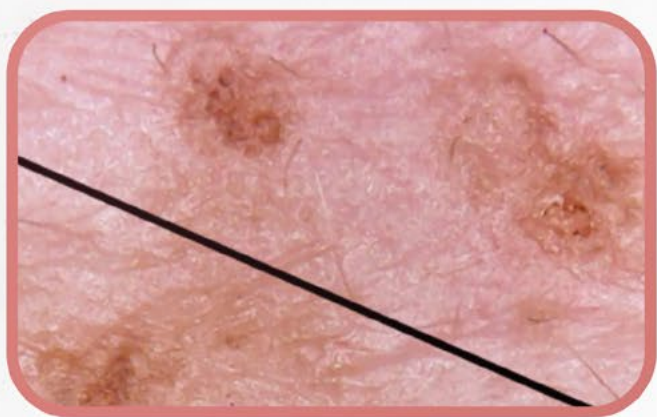

Caso o tratamento seja referente a uma ruga ou linha de expressão, a aplicação deve ser realizada paralela a linha, como se estivesse costurando.

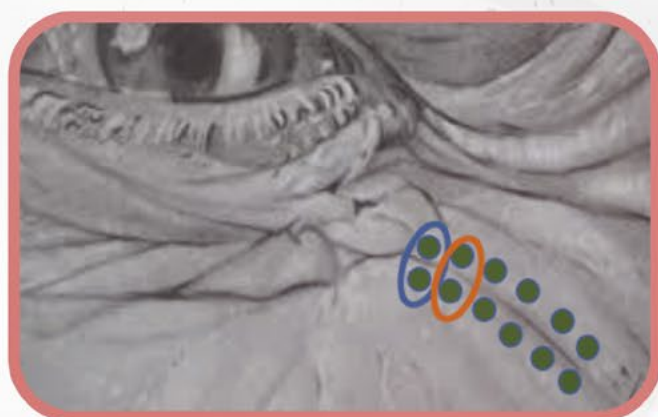

Os pontos precisam ser realizados em pares nesta sequência, o par azul depois o laranja e assim sucessivamente.

3-Permeação DE ATIVOS

A técnica consiste na utilização das ponteira disco em contato direto com a pele de maneira dinâmica (no sentido lifting ou em zigue zague). Caso o ativo desejado tenha polaridade negativa, você pode utilizar de maneira conjunta com a aplicação do Plasmed. Caso o ativo não tenha polaridade ou polaridade positiva, pode ser realizado o peeling primeiro seguido com o ativo.

Parâmetros: Intensidades: 1 a 4

Pode ser realizado com ou sem gel (caso seja realizado a seco, será necessária uma intensidade menor).

Aplicação em zigue zague ou no sentido do lifting Intervalo entre as sessões: 7 dias

Ponteiras: P, M e G e discos (menor e maior)

Indicações: Permeação de ativos

Os resultados dos sonhos não **SÃO REALIZADOS APENAS DURANTE AS SESSÕES**

Um bom resultado não acontece somente nas sessões, é necessário que haja um bom pós e que todas as orientações sejam seguidas, por isso é sempre importante conscientizar o paciente.

Sabemos que há diversos tipos de clientes, as que tomam cuidado após o procedimento e as que não dão tanta atenção, por isso você, profissional, deverá explicar a importância disso, pois todo o resultado depende do pós, para não ter nenhum problema.

- É recomendado a utilização de pomadas de cicatrização, indicado passar duas vezes ao dia (manhã e noite);
- O paciente deve ficar 24 horas sem lavar a área para não esfregar o local. Sempre utilizar sabonete neutro e água fria visando o auxílio na cicatrização;
- Utilizar protetor solar fps 60 a partir de 24 horas;
- Pode ser indicado o uso de cosméticos de tensionamento e fatores de crescimento 24 horas após a realização do procedimento.



3 Associações com o Plasmed QUE IRÃO TE AJUDAR NO TRATAMENTO DE FLACIDEZ



A associação de tecnologias tem o poder de potencializar os resultados, para o tratamento de flacidez vamos te indicar 3 associações com o jato de plasma. É importante lembrar que em cada procedimento o profissional deverá respeitar o intervalo de tratamento.

Plasmed + Microcorrente NA MESMA SESSÃO



O mecanismo de ação do jato de plasma é gerar várias lesões para que o tecido se recupere e se repare, trazendo assim um novo colágeno e uma nova aparência para o tecido. Porém para que isso aconteça corretamente, as células da pele devem estar em homeostase, ou seja, em equilíbrio e seu funcionamento bioenergético e bioelétrico deve estar em perfeito estado. Basicamente, não adianta somente lesionar um tecido se suas células não estiverem com sua capacidade energética suficiente para se repararem da melhor forma possível.

Nesse caso, podemos contar com a associação da Microcorrente, conhecida também por sua sigla MENS, visto que é um tratamento de eletroestimulação que utiliza corrente de baixa intensidade e baixa frequência e atua a nível celular. Essa corrente tem por objetivo estimular a normalização, nutrição e bioestimulação, podendo aumentar o metabolismo das células em até 500%, incluindo a produção de energia, oxigenação e eliminação de resíduos. A Microcorrente pode ser utilizada antes ou após a técnica de jato de plasma, potencializando o transporte ativo de aminoácidos a síntese de proteína e a melhora do funcionamento do sistema linfático. E o mais importante nessa associação de recursos, a MENS é utilizada para potencializar a aceleração do processo de reparo tecidual.



Plasmed + Laser de baixa **POTÊNCIA PÓS IMEDIATO**



A Fotobiomodulação utilizando o Laser de Baixa Potência é uma excelente combinação com a técnica de Jato de Plasma. Sabemos que a tecnologia de jato de plasma gera pequenas lesões controladas para estimular o reparo tecidual, porém toda lesão na pele por mais que seja controlada gera um processo inflamatório. Esse processo pode ser maior ou menor, dependendo do tipo e grau da lesão. Quanto maior o processo inflamatório instalado, mais presente estarão os principais sinais clínicos que podem indicar uma inflamação, que são: edema, dor, vermelhidão, sensação de calor, diminuição do movimento ou função da região afetada, sinais esses que geram desconforto após o procedimento. Para a técnica de jato de plasma é essencial que o tecido passe por todo esse processo de lesão, e com isso gere um processo inflamatório e com ele todas as suas fases até o remodelamento total desse tecido, porém a inflamação deve ser controlada, diminuindo o risco de reações adversas como: hipopigmentação, hiperpigmentação e cicatrizes atróficas. Por isso, a associação do laser de baixa potência possui indicação para o pós imediato, em outros termos no mesmo dia, ou durante os 7 dias, uma vez que a fotobiomodulação, além de proporcionar efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, também influencia positivamente a função dos macrófagos, ativando a produção de fatores de crescimento que favorecem o aumento da proliferação celular, melhorando a qualidade da cicatrização.



Plasmed + Radiofrequência **DENTRO DO MESMO PROGRAMA**



A radiofrequência e o Jato de Plasma formam uma poderosa associação. A radiofrequência é um tratamento que promove o aumento da temperatura da pele a ser tratada para favorecer a produção de colágeno e de elastina, sendo muito eficaz para diversos tratamentos como: melhora das rugas, linhas de expressão e do aspecto de envelhecimento da pele.

A radiofrequência atua na camada profunda da derme, modelando fibrilas de colágeno, estimulando proteínas específicas e fatores de crescimento e com isso, recondicionando a pele.

No plano de tratamento onde existe essa associação entre esses dois recursos é indicado trabalhar primeiramente com a radiofrequência, com o intuito de preparar a pele, intensificando a hidratação e a revitalização, através da nutrição e aumento da circulação, assim como estimulando a formação de colágeno.

Após esse preparo com a radiofrequência, onde é indicado em média 5 sessões e a hora de realizar a técnica de Jato de Plasma, trabalhando nos tecidos mais superficiais e potencializando o tratamento anterior.

Legal, agora sei tudo sobre a tecnologia, **MAS... COMO EU VENDO?**

Agora que você já entendeu tudo sobre jato de plasma, você precisa se preparar para vender! Para alavancar as suas vendas, iremos te passar dicas sobre marketing e vendas que irão te auxiliar no dia a dia.

O primeiro passo é entender como você divulga os seus procedimentos e se atualmente o seu cliente opta por você por preço ou por entender que você entrega um ótimo serviço com base no seu conhecimento. Por isso, preciso que você responda todas essas perguntas com detalhes.

Quem são seus principais concorrentes?

Cite dois pontos fortes do seu atendimento e dois a serem trabalhados.

Hoje, como você realiza as suas divulgações?

☐ Redes sociais ☐ Com panfletos (Materiais impressos) ☐ Tenho parceria com outros comércios ☐ Faço anúncios nas redes sociais (tráfego pago) ☐ Indicações de pacientes ☐ Não faço divulgações

Descreva sobre o público que frequenta a sua clínica

(média de idade, sexo, cidade, possui filhos, a rotina é corrida ou é mais calma).

Hoje você dá algum tipo de treinamento para os atendentes de sua clínica?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não posso funcionários

Os preços que você pratica no seu ponto de vista está:

☐ Abaixo do mercado ☐ Preço justo ☐ Acima do preço

Agora que você respondeu todo esse questionário faça uma autoanálise sobre o que você precisa melhorar e vamos te passar algumas dicas.

8 dicas valiosas que podem **SALVAR O SEU NEGÓCIO**

1- Para vender bem você precisa conhecer o seu público.

Busque entender se ele é mais feminino ou masculino, quais são as principais queixas, se a rotina é corrida ou mais tranquila, qual é a faixa etária e em qual cidade eles moram, entre outras informações. Tudo isso é importante para você adaptar a comunicação e buscar melhorias que vão ser valorizadas pelos clientes.

2- Encante o seu cliente

Ter um atendimento de qualidade é um passo essencial, é o primeiro contato que o cliente terá com você, ou seja, tire todas as dúvidas e inseguranças, além disso é muito importante ter pessoas treinadas e que conheçam os produtos que você vende.

3- Fuja da guerra de preços

O primeiro passo é sair da guerra de preços que o mercado acaba executando, não queira atrair clientes pelo preço, atraia pela qualidade e o tipo de serviço que o cliente encontra na sua clínica, ou seja, gere valor para o seu cliente.

Queira clientes que entendam o valor do seu trabalho, pois o mesmo cliente que veio por preço, vai por preço. O primeiro passo é conhecer os seus clientes e verificar o que mais chama a atenção dele, o que o agrada.

Temos um e-book completo que aborda esse tema de forma aprofundada, baixe clicando aqui. (<https://ibramed.com.br/fuja-da-guerra-de-precos-na-estetica/>)

4- Quem não é visto não é lembrado

Faça uma boa divulgação, é muito importante estar presente nas redes sociais, muitas pessoas vão passar a te conhecer através delas. Faça fotos e vídeos, do seu espaço, dos atendimentos, se o paciente autorizar, explique sobre os tratamentos e tecnologias que você possui e mostre quando for fazer um curso novo. Busque produzir conteúdos, não postar somente publicações de vendas. Use e abuse da sua criatividade!

5- Escute o seu cliente

Uma dica muito boa, é realizar uma pesquisa de satisfação com os seus clientes, pode ser feita de forma online através do formulário do google ou até mesmo em um papel que você dará após a finalização do tratamento. Faça perguntas como o cliente chegou até você, o que ele mais gostou, qual a nota para o atendimento, tratamento e o que mais você achar importante. Isso é um ótimo jeito de entender o seu público.

6- Faça parcerias com empresas locais

É muito bacana ter parcerias com empresas como academia, lojas de roupa e outros tipos de negócio que façam sentido para você. A parceria pode ser desde apresentar o seu trabalho ou até mesmo um cupom de desconto (que seja planejado e você consiga dar sem prejudicar o seu financeiro) para quem comprar ou frequentar x lugar.

Pense em coisas que você consiga fazer sem causar prejuízo a longo prazo e que vão te fazer alcançar um público maior.

7- Os estudos nunca param

É extremamente importante você reservar uma verba e tempo para se dedicar a novas técnicas, tecnologias e inovações do mercado. Procurem pessoas que ensinam com embasamento científico e atualize-se.

8- Busque bons fornecedores

Ter fornecedores que entregam produtos e serviços de qualidade afetam diretamente em seu atendimento, por isso procure empresas que possuam boas referências, que possuem como pilares o conhecimento, ética e segurança. É necessário ter confiança e acreditar nas empresas que você irá comprar.

Só por você ter chego até o final do seu e-book pode ter certeza que você já está no caminho certo, que busca inovação, conhecimento e que quer transformar a vida de seus pacientes.

Agora é hora de colocar a mão na massa!! Boa sorte!

TORNE-SE **EXPERT** *em* **JATO DE PLASMA**

Curso completo sobre Jato de Plasma! São mais de 20 módulos, 131 aulas, 28 protocolos para você se tornar expert e alavancar o seu faturamento. Com aulas teóricas e práticas você terá acesso a protocolos e conteúdos inéditos.

Bônus:

Aprenda a usar 100% do seu equipamento e entregue os melhores resultados!

Esse curso é para você que quer agregar mais valor nos seus atendimentos, está sempre em busca de conhecimento e inovação, que quer se tornar autoridade no mercado e triplicar o seu faturamento.

*Clique aqui e tenha acesso
à protocolos inéditos!*



IBRAMED

Somos uma empresa originalmente brasileira produtora de equipamentos para as áreas de reabilitação física, estética e medicina estética. Nos pautamos pelos conceitos de ética, respeito, inovação, flexibilidade e responsabilidade socioambiental.

Com mais de duas décadas, passamos por incontáveis momentos: em centenas de eventos, treinamentos, simpósios, workshops, revendas, assistências técnicas, entre outros. Com a meta sempre de transformar vidas, elevar autoestima e devolver sorrisos, fortalecendo nosso relacionamento com você.

